

HOE UW INHALATOR RESPIMAT® TE GEBRUIKEN

VOOR DAGELIJKS GEBRUIK: 2 puffs, éénmaal daags

Onthoud de afkorting **TOP**



1. TURN

- Houd de beschermkap gesloten
- DRAAI de doorzichtige houder in de richting van de pijl totdat u een klik hoort (een halve draai)



2. OPEN

- OPEN de beschermkap volledig via het klepje aan de zijkant
- Adem langzaam en volledig uit, en sluit daarna uw lippen om het mondstuk



3. PUSH

- DRUK op de grijze knop terwijl u langzaam inademt
- Herhaal deze 3 stappen, zodat u in totaal 2x pufft

UW RESPIMAT® IS NU HERLAADBAAR!

Gebruiksaanwijzing om uw Respimat® te herladen



Een nieuw patroon bevat 60 inhalaties, wat overeenkomt met 30 dagen behandeling.



Opgelet, wanneer de teller geel kleurt, is het bijna tijd om uw patroon te vervangen. Kijk na of u er nog voldoende in voorraad hebt!



Wanneer de teller rood is, is uw Respimat® leeg. Het patroon komt automatisch los. Om uw Respimat® te herladen, volg je de instructies op de achterzijde.

Zijn al uw patronen op? Neem contact op met uw arts om uw voorschrift te verlengen. Herlaadbare inhalator enkel bij verpakkingen met 3 patronen.

BETER VOOR HET MILIEU!

- VERNIEUWD - RESPIMAT®

Patroon moet **vervangen** worden wanneer deze leeg is



Hoe de patroon vervangen?

1. Een duidelijk signaal:

- De doorzichtige houder komt automatisch los.

2. Even eenvoudig als het vervangen van een batterij:

- De lege patroon **verwijderen**.
- De nieuwe patroon **plaatsen**.
- De doorzichtige houder terugplaatsen. Zorg dat u de **klik** hoort.

Verantwoordelijke uitgever SCS boehringer Ingelheim Comm. V, Arianelaan 16, 12000 Brussel